

血液バッグ温度モニタリング専用シール

“ブラッドテンプ” Blood Temp

“ブラッドテンプ”は血液バッグに貼るだけのシンプルな方法で、血液バッグの安全な運用をお手伝いをします。



“ブラッドテンプ”は輸送中や保管時の血液バッグの中心温度のモニタリング専用の温度感知シールです。


血液バッグの中心温度が10℃以上の環境に曝されると、ウィンドウが白→青に染色され、該当するバッグが廃棄の必要があることが一目でわかります。

使用方法


シール中央のボタンを押し込み、血液バッグに貼付けます。

導入メリット

- 血液バッグの温度変化が明確にわかるため、適切な廃棄を促すと同時に無駄な廃棄を防ぎます。
- 低コストで温度モニタリングが行えます。
- 誰にでもわかる、シンプルな使用方法。
- 忙しい現場でも、一目で判断可能です。

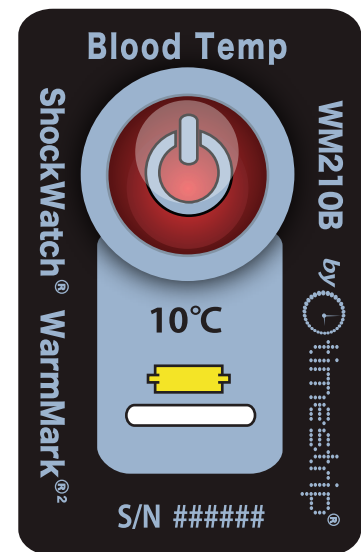

バッグの中心温度が10℃以上の環境に曝されるとウィンドウが白→青へ染色して、異常を知らせます。

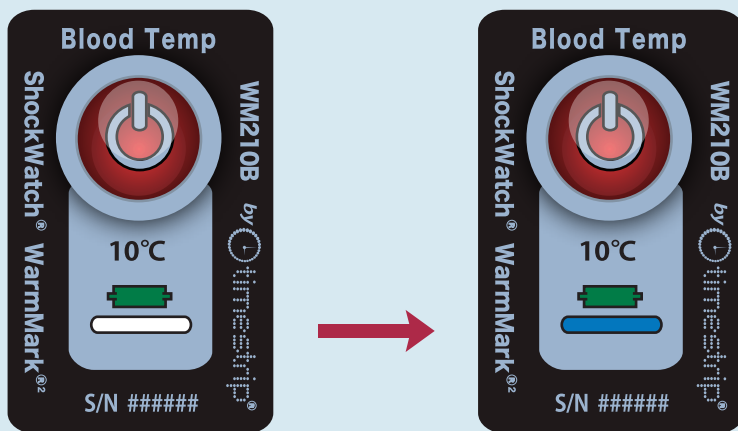

正常

10℃以上

サイズ:縦85mm x 横53mm

温度精度:±1℃

保存期間:2年間

保管温度:冷暗所にて常温保存

20~80%RHで22℃/72°F推奨

※不可逆式(一度染色すれば元に戻りません)